

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CELLU M6 ALLIANCE® UPDATE



VIA INTERNET CONNECTION


aktualizace pomocí internetu

UPDATING YOUR DEVICE

When an update is available, the following screen appears when you start the machine. The "i" allows to get information about the update. Click on **OK** to start the update.

Aktualizace zařízení

Je-li k dispozici aktualizace, objeví se na monitoru upozornění při zapnutí počítače. "" I "" umožňuje získat informace o aktualizaci." Klepnutím na tlačítko OK spustíte aktualizaci

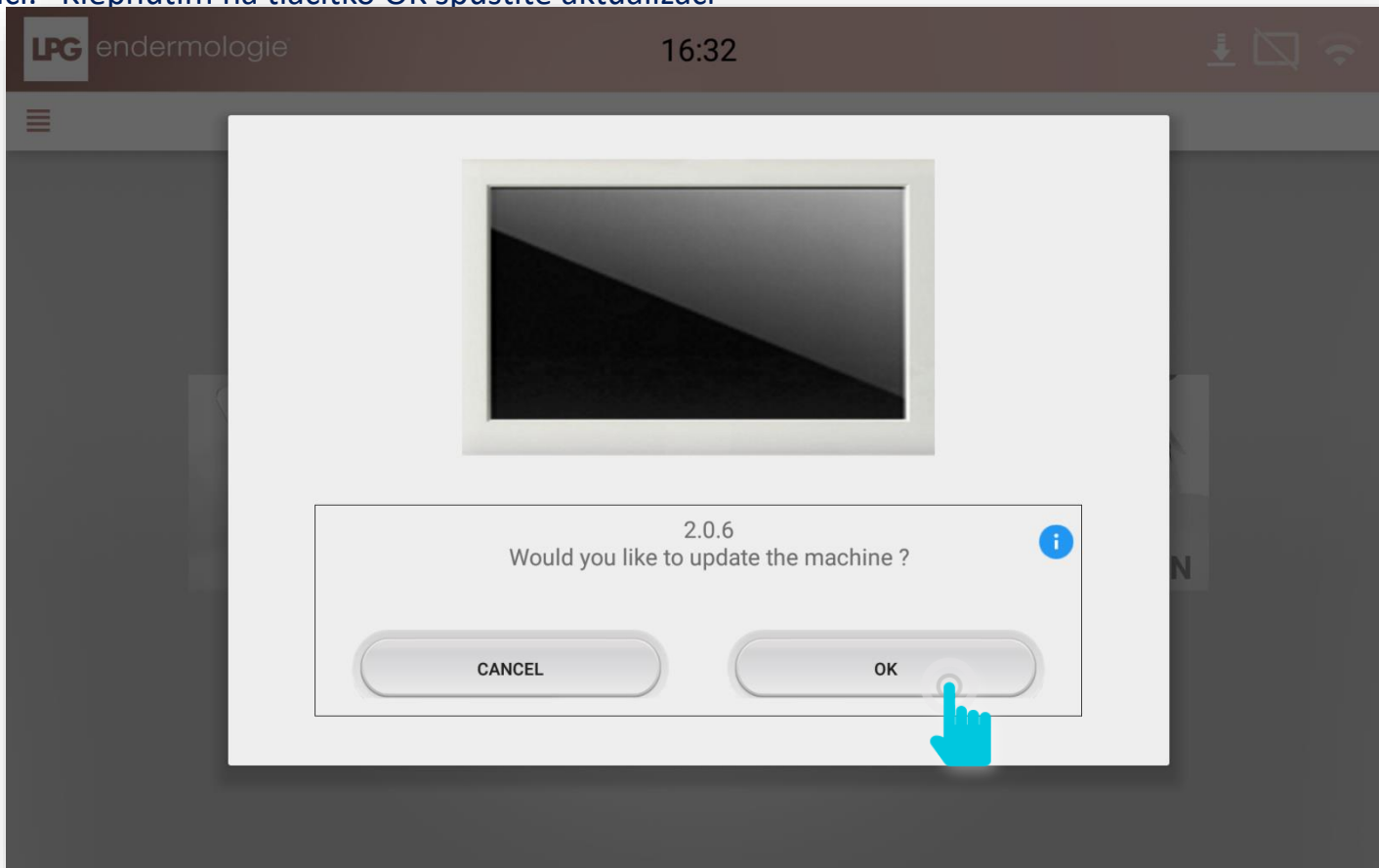

VIA USB STICK

(bez připojení internetu)

Please contact your local LPG® distributor

Kontaktujte prosím vašeho
distributora


UPDATING YOUR DEVICE

AKTUALIZACE DAT VAŠEHO PRÍSTROJE

Click on the icon at the top left hand corner of the screen




Klikněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky.

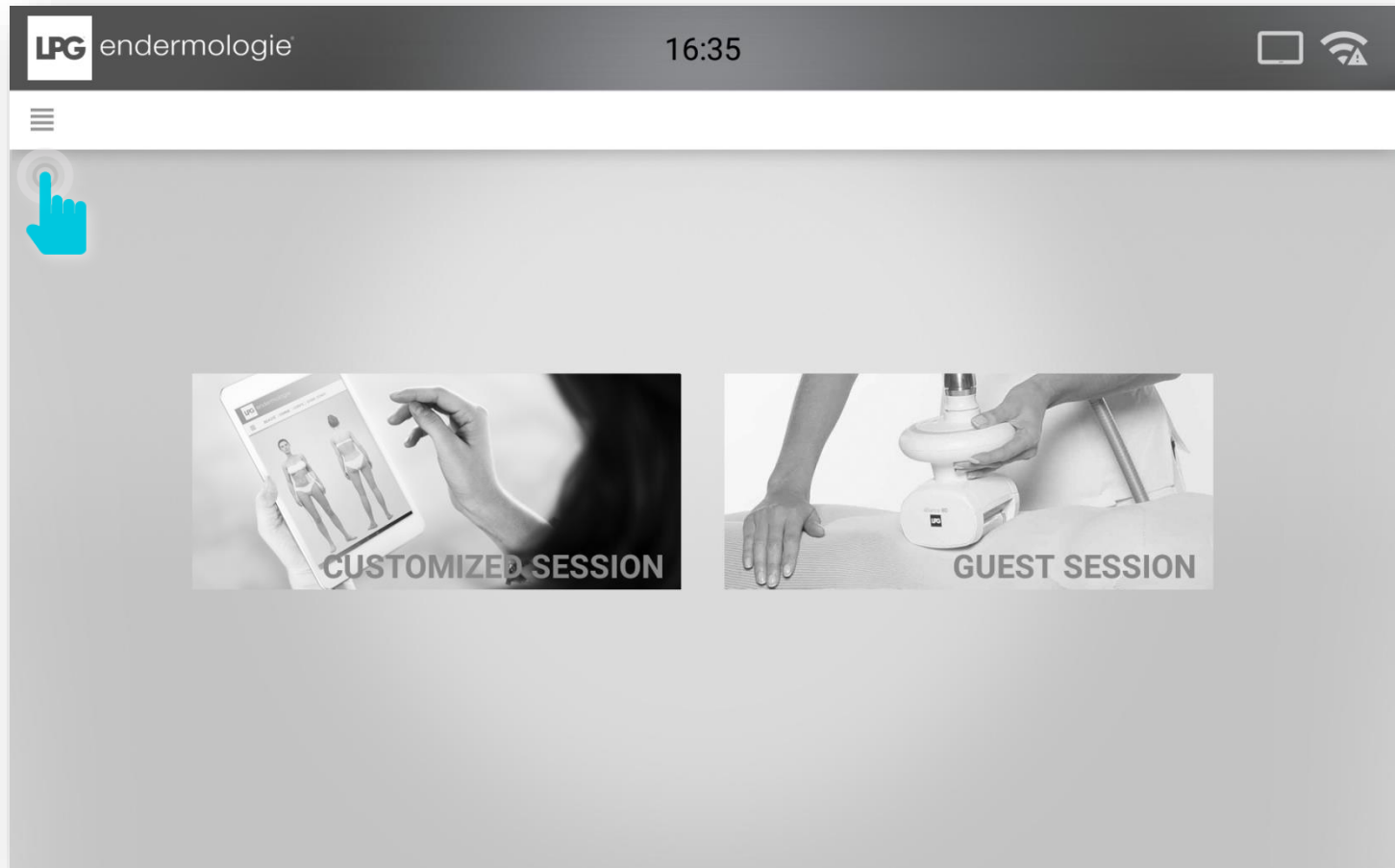


UPDATING YOUR DEVICE

Click on **SETTINGS**. Klikněte na nastavení.

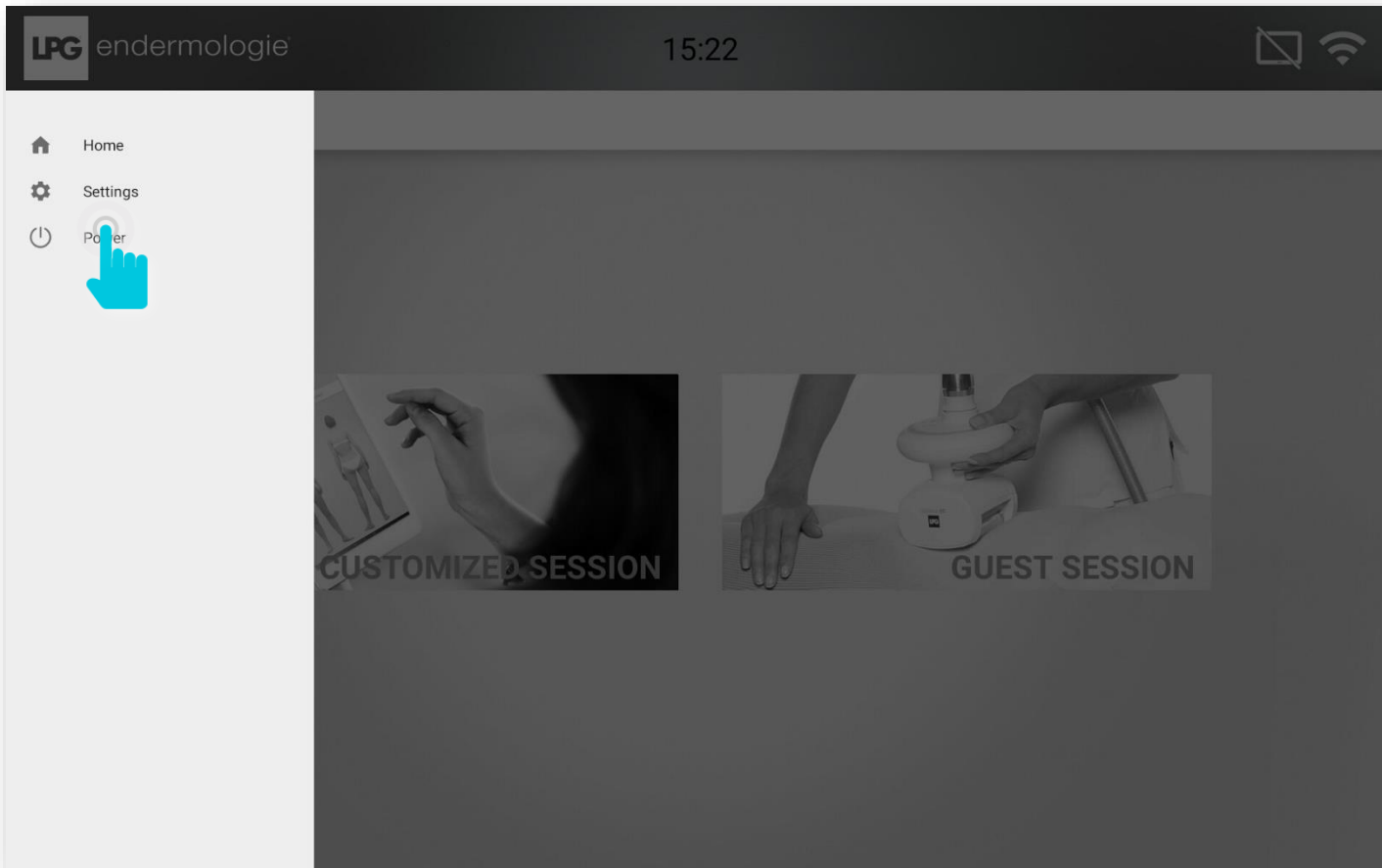


UPDATING YOUR DEVICE

Click on **UPDATE**. Potvrďte aktualizaci kliknutím na ikonu UPDATE.

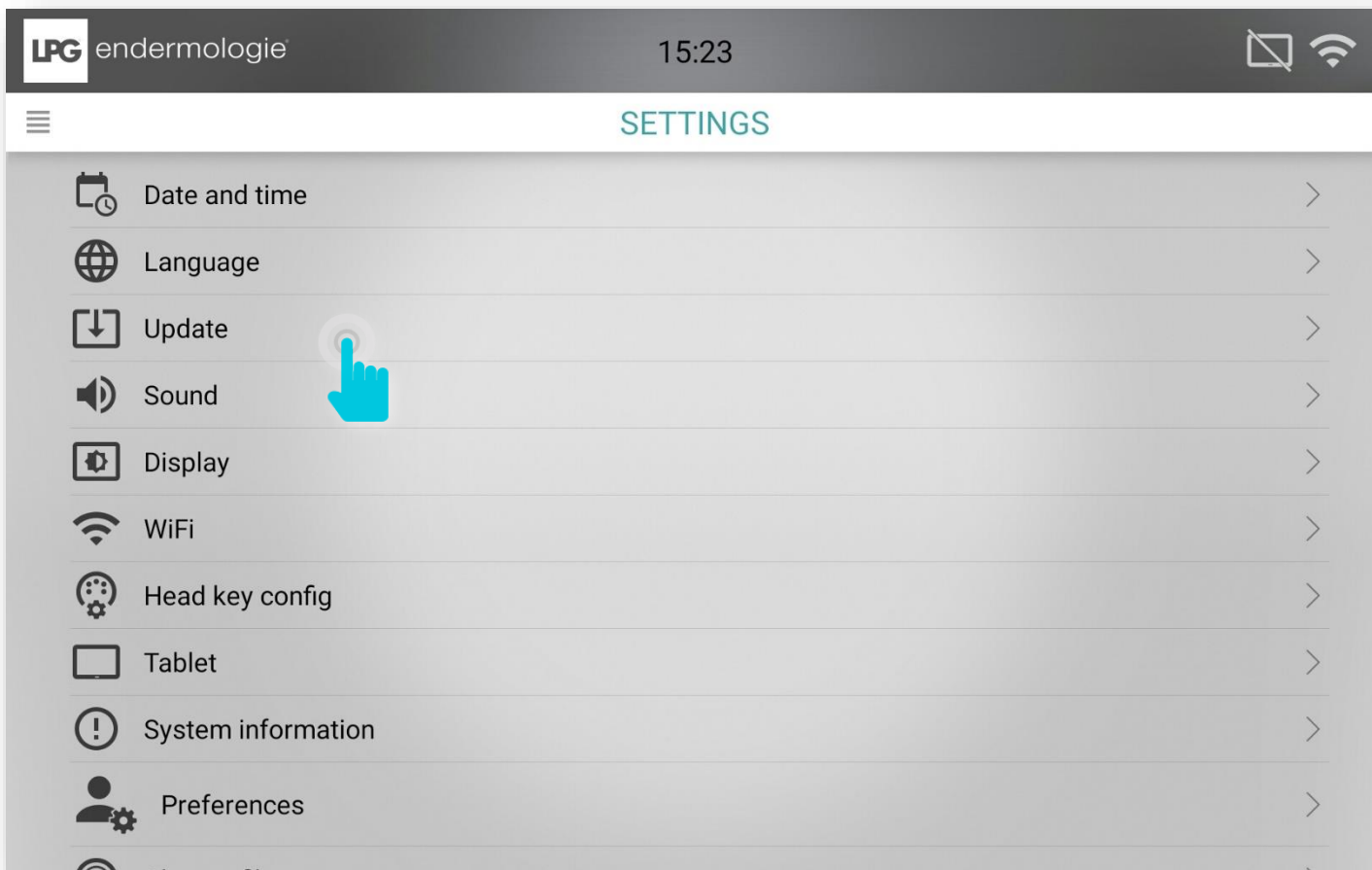


UPDATING YOUR DEVICE

Click on **OK**.Potvrďte stisknutím OK.

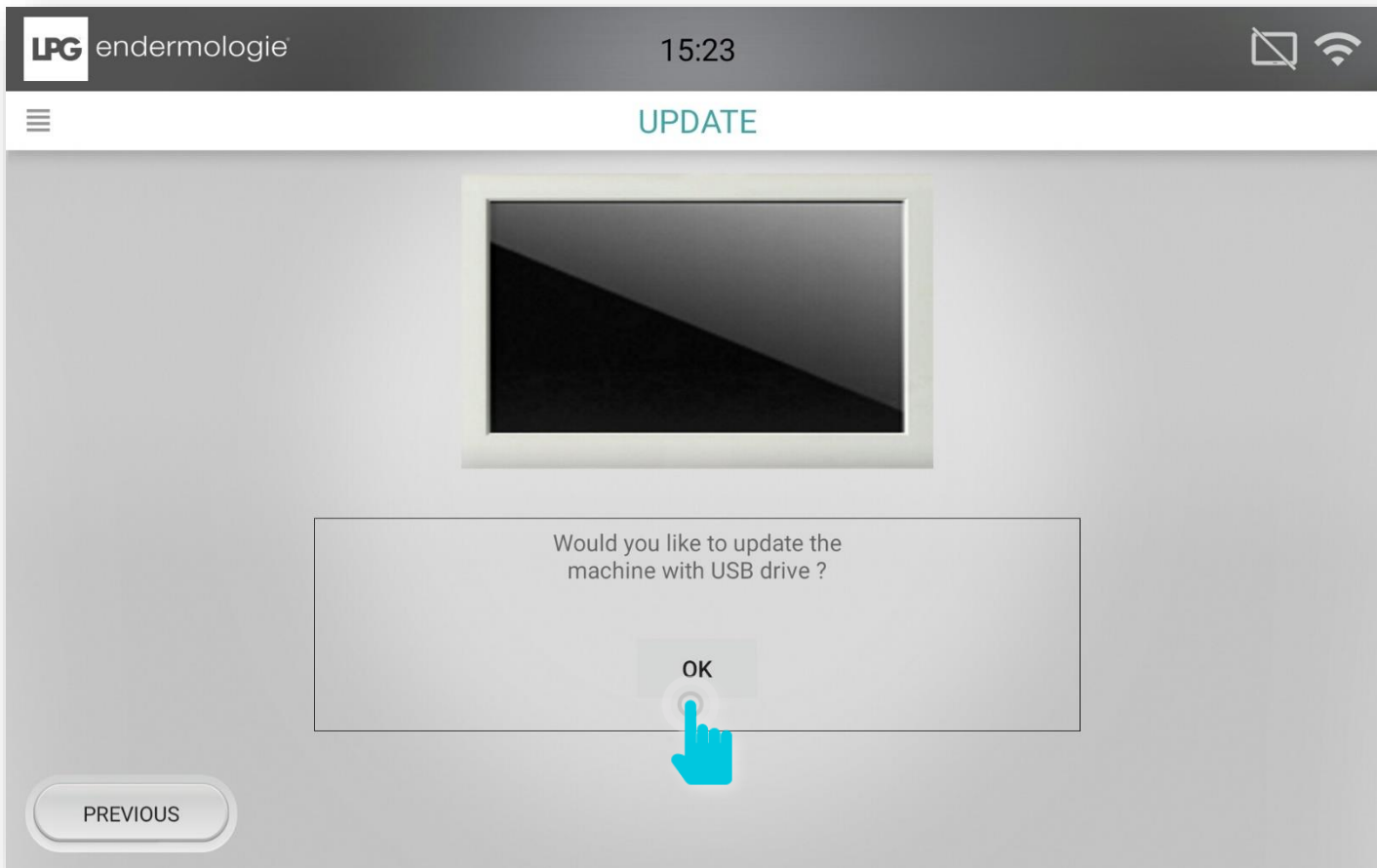

UPDATING YOUR DEVICE

Plug in the USB stick containing the update package. Připojte USB kartu obsahující balíček aktualizace.

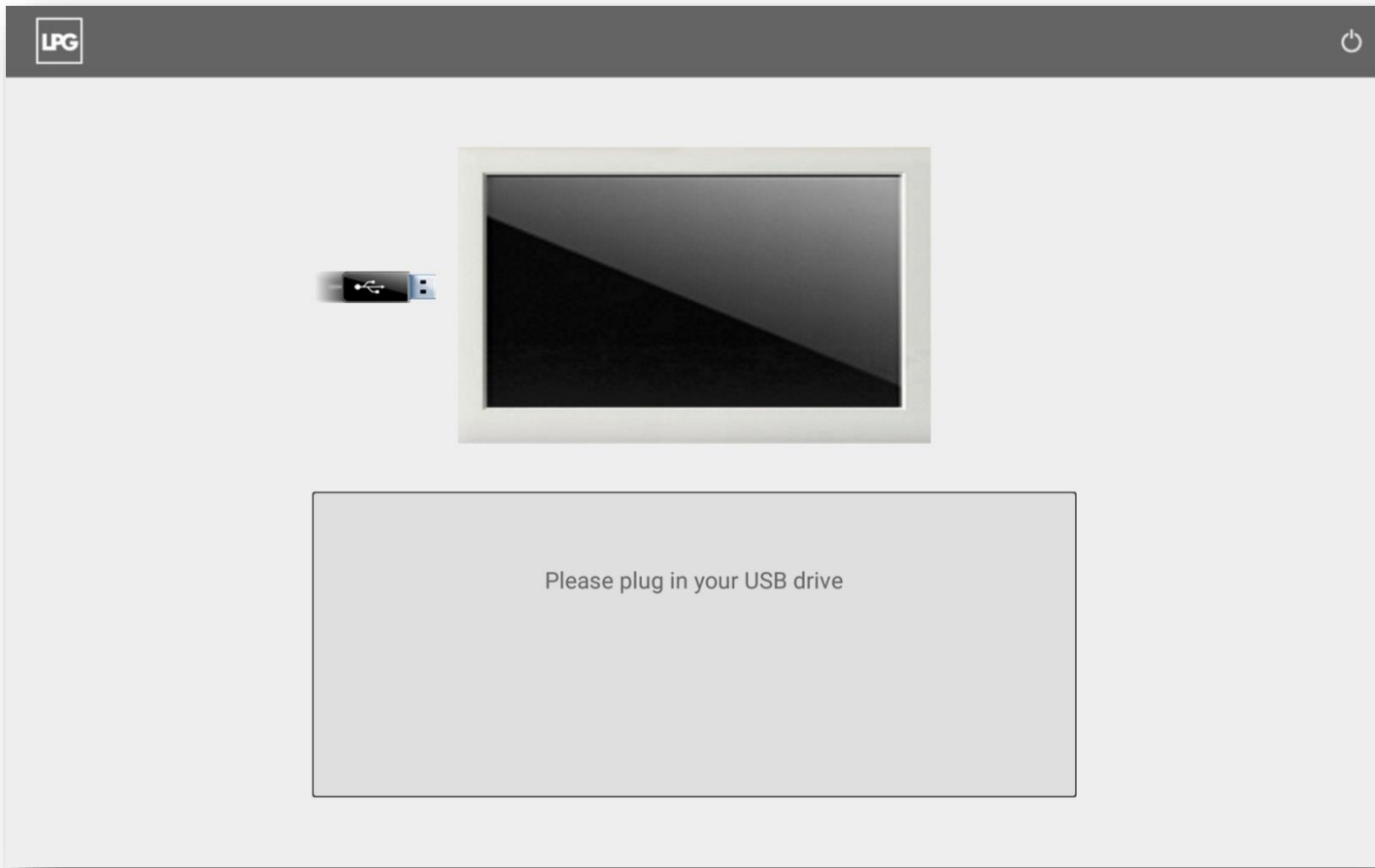

UPDATING YOUR DEVICE

Click on **OK** to install the package. Potvrzením tlačítka OK instalujete nová data.

