



Nová hloubková péče o pleť

DEEP CLEANSING

endermologie® signature treatment LPG

LPG®



Nová hloubková péče o pleť DEEP CLEANSING endermologie®

OŠETŘENÍ POSKYTUJE JEDINEČNÝ
SMYSLOVÝ ZÁŽITEK SPOJUJÍCÍ
MECHANICKOU STIMULACI BUNĚK
S DVOJNÁSOBNOU CHEMICKOU EXFOLIACÍ.

ŠETRNĚ DETOXIFIKUJE A ČISTÍ

Kombinace nového produktu LPG® Exfoliating Cream a Peeling Technology 20% s ošetřením endermologie® pleť vyčistí do hloubky a uvolní nahromaděné toxiny. Póry se stáhnou, povrch pokožky se zjemní a vyhladí. Pleť je vyhlazená a zářivá.

AKTIVACE BUNĚK MLÁDÍ

Ošetřující hlavice Ergolift® cíleně stimuluje buňky, tím se zvýší přirozená produkce nového kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové (základní látky dermis).

Pokožka je pevnější, hutnější a hydratovaná, pohled očí rozjasněný a rty plnější.

NOVÁ HLOUBKOVÁ PÉČE O PLEŤ

DEEP CLEANSING endermologie® může být aplikována jednou za měsíc. Ošetření je vhodné jako „startovací“ léčba před cílenou péčí endermologie® nebo jako následná péče pro optimalizaci výsledků.

KROK 1

ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA

2 MINUTY



MICERÁLNÍ VODA

Micelární vodu naneste na oblast obličeje a krku vatovými tampony. Pak pokožku dobře vysušte papírovými ubrousky.

1 – krk / 2 – obě tváře / 3 – čelo / 4 – nos



KROK 2

EXFOLIACE A DRENÁŽ

10 MINUT




EXFOLIAČNÍ KRÉM

Exfoliační krém naneste na vodou navlhčený obličej a na krk. Jemně vmasírujte 9 specifickými drenážními postupy (uvedené na další straně).

Tento krok pomáhá uvolnit kožní maz a toxiny, oživuje a rozjasňuje pleť.

MANUÁLNÍ POHYB ①

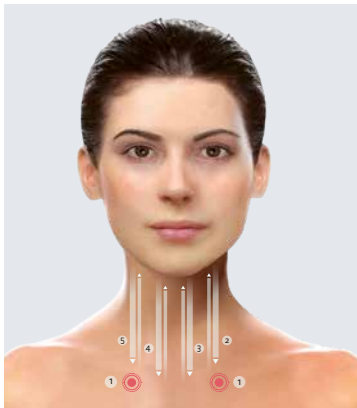


Stiskněte 5x lymfatické body (1) na obou stranách.
Pak masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ②




Stiskněte 5x lymfatické body (1) na obou stranách.
Pak masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ③

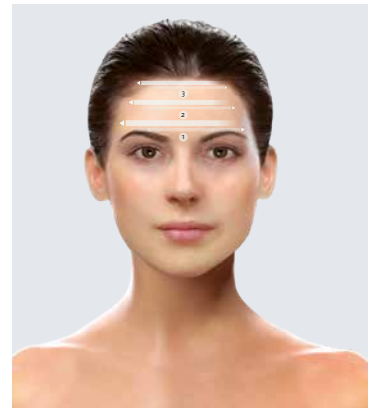


Masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ④

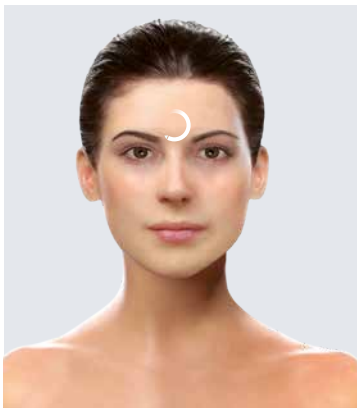


Masírujte krouživým pohybem. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ⑤

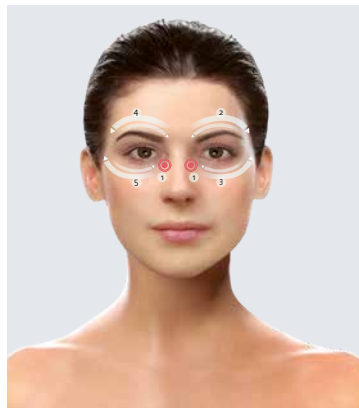


Stiskněte 5x lymfatické body (1) na obou stranách.
Pak masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ⑥

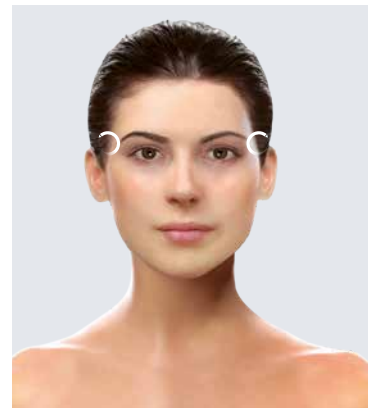

Masírujte krouživým pohybem. Opakujte 3krát.


MANUÁLNÍ POHYB ⑦

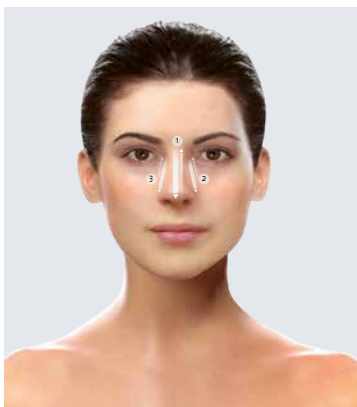

Masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.


Nos je partie, kde bývá kůže mastnější s rozšířenými póry, proto je to důležité tuto oblast stimulovat.

MANUÁLNÍ POHYB ⑧

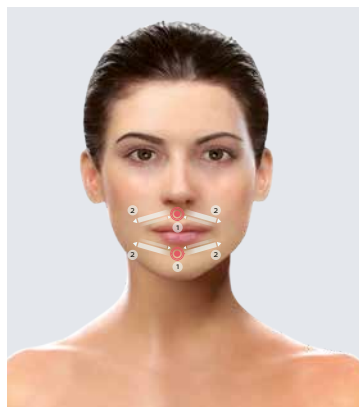

Stiskněte 5x lymfatické body (1) na obou stranách.
Pak masážním pohybem tam a zpět ošetřete oblast. Opakujte 3krát.

MANUÁLNÍ POHYB ⑨

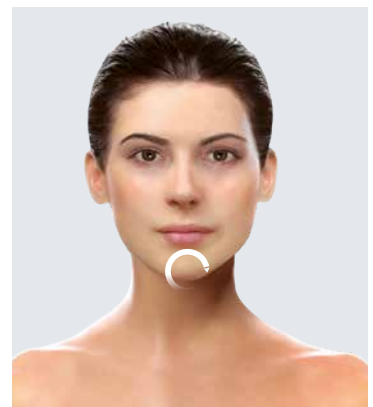

Masírujte krouživým pohybem. Opakujte 3krát.



Omyjte čistou vodou a pak pokožku očistěte vatovými tampony s LPG micelární vodou (Preparing Micellar Water), abyste důkladně odstranili exfoliační krém.

Pokožku dobře vysušte měkkými papírovými ubrousky.


KROK 3

AKTIVACE BUNĚK MLÁDÍ

25 MINUT




① 2 MINUTY | LIFT 20

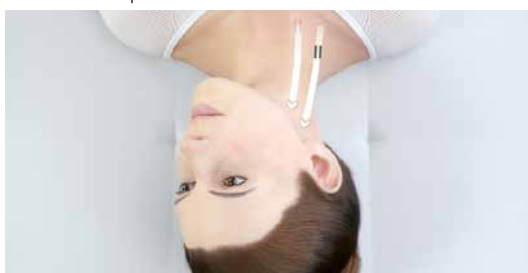

Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 2,5


④ 3,5 MINUTY | LIFT 20

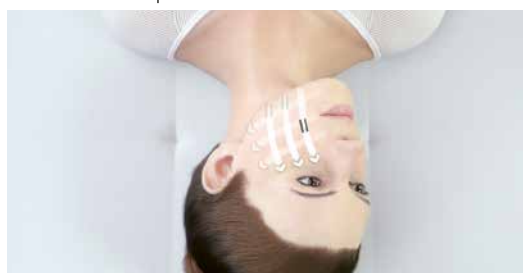

Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 2,5


② 3,5 MINUTY | LIFT 20

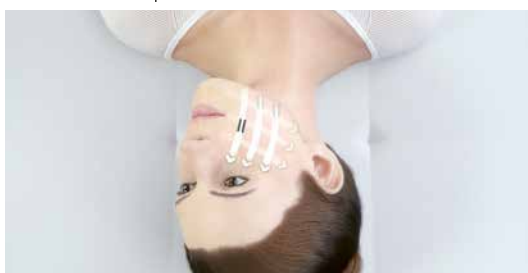

Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 2,5


⑤ 30 SEKUND | LIFT 20

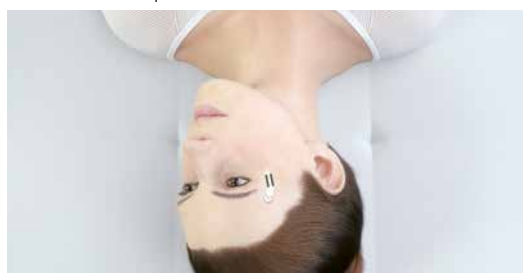

Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5

③ 2 MINUTY | LIFT 20

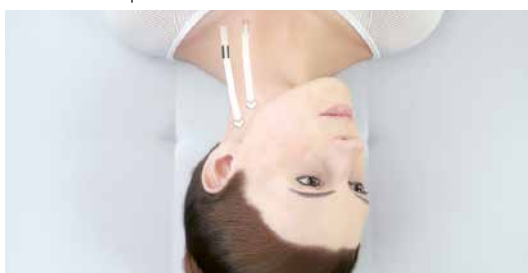

Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 2,5

⑥ 30 SEKUND | LIFT 20



Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 30

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5

⑦ 2 MINUTY | LIFT 20



Frekvence (F): 12 Hz
Pracovní cyklus (DC): 40

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 2,5


⑫ 1 MINUTA | LIFT 10



Frekvence (F): 2 Hz
Pracovní cyklus (DC): 40

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5


⑧ 1,5 MINUTY | LIFT 10

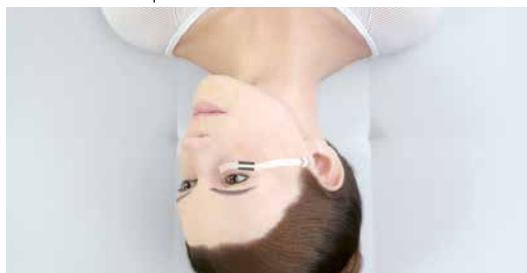

Frekvence (F): 2 Hz
Pracovní cyklus (DC): 20

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5


⑬ 1,5 MINUTY | LIFT 10

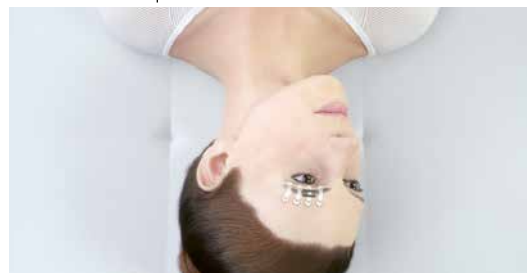

Frekvence (F): 4 Hz
Pracovní cyklus (DC): 20

Frekvence klapky (FF): 3
Intenzita sání: 0,5 - 1,5


⑨ 1 MINUTA | LIFT 10

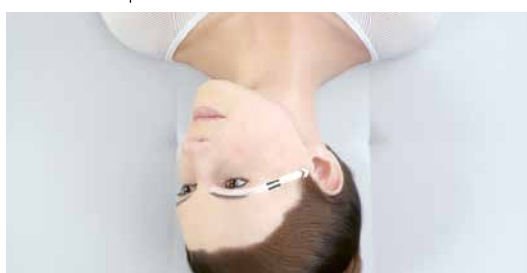

Frekvence (F): 2 Hz
Pracovní cyklus (DC): 40

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5


⑭ 2 MINUTY | LIFT 10

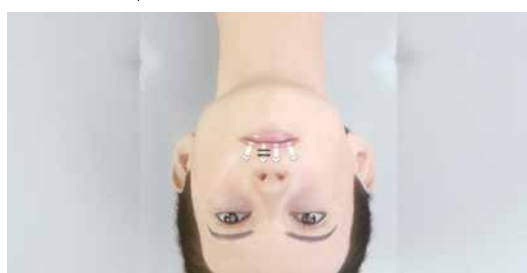

Frekvence (F): 4 Hz
Pracovní cyklus (DC): 40

Frekvence klapky (FF): 3
Intenzita sání: 0,5 - 2


⑩ 1,5 MINUTY | LIFT 10

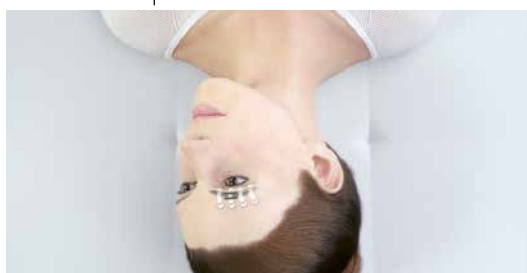

Frekvence (F): 4 Hz
Pracovní cyklus (DC): 20

Frekvence klapky (FF): 3
Intenzita sání: 0,5 - 1,5


⑮ 1 MINUTA | LIFT 10

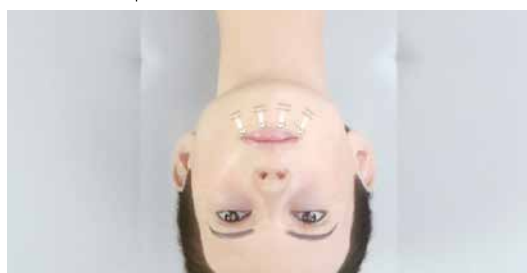

Frekvence (F): 4 Hz
Pracovní cyklus (DC): 40

Frekvence klapky (FF): 4
Intenzita sání: 0,5 - 2

⑪ 1,5 MINUTY | LIFT 10

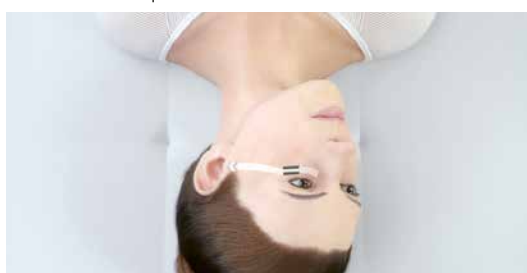

Frekvence (F): 2 Hz
Pracovní cyklus (DC): 20

Frekvence klapky (FF): 2
Intenzita sání: 0,5 - 1,5



KROK 4

PEELING A ROZJASNĚNÍ

15 MINUT

Chraňte oči vatovými tampónky namočenými v micelární vodě Preparing Micellar Water.

Naneste LPG® Peeling Technology 20% na obličej a na krk pomocí dávkovače. Začněte na T-zóně a pak ošetřete jemnější citlivé partie.

Nechte působit 2–3 minuty na citlivé pokožce, 5 minut ponechte na normální až silné pokožce. Vyhněte se kontaktu s očima.

Omyjte čistou vodou a pak pokožku očistěte vatovými tampony s micelární vodou LPG (Preparing Micellar Water), abyste důkladně odstranili peeling.

Upozornění: V případě pocitu pálení produkt okamžitě odstraňte a dané místo důkladně opláchněte vodou.



KROK 5

HYDRATAČE A ZKLIDNĚNÍ

20 MINUT

Naneste kolagenovou masku **Post-Care Collagen Mask** na partie obličeje a dekoltu, nechte působit 15 minut.

Během působení masky umocněte smyslový zážitek ošetření masírováním krouživými pohyby od středu ven, začněte na dekoltu a pak postupujte směrem vzhůru přes tvář.

Zbylé sérum jemným poklepem vmasírujte do pokožky.



KROK 6

VYHLAZENÍ A VYPLNĚNÍ

3 MINUTY



TOTAL EYE CARE

Oční péče

Naneste pomocí kruživých pohybů a lehkého poklepávání.



INTENSE HYDRATING SMOOTHING SERUM

Intenzivní hydratační zjemňující sérum

Naneste na obličej a krk jemným masírováním směrem vzhůru, od krku až k čelu.



CÍLENÝ KOSMETICKÝ PRODUKT LPG® DLE TYPU PLETI KLIENTA:

REPLENISHING FIRMING CREAM Výživný zpevňující krém (vrásky)

TENSING FIRMING CREAM Vyhlazuující zpevňující krém (obnova hutnosti)

FIRMING V-SHAPING CREAM Zpevňující modelační krém (zeštíhlení a obnova kontur)

Krém naneste na oblast obličeje a krku jemným masírováním směrem od dekoltu nahoru.



KP Medical s.r.o., výhradní distributor
LPG Systems pro ČR a SR
Tel.: + 420 602 771 540
E-mail: info@kpmedical.cz

kpmedical.cz

endermologie.com

